



Otoadd Controlアプリ

取扱説明書

目次

1. はじめに.....	3
1.1 Otoadd Controlアプリについて	3
1.2 システム要件	3
1.3 特徴.....	3
1.4 安全上のご注意	3
2. 開始.....	4
2.1 Otoadd Controlアプリのインストール.....	4
2.2 補聴器と携帯電話のペアリング	5
2.3 アプリの許可	5
2.4 アプリの言語設定	6
2.5 補聴器Classic Rに接続します	6
3 アプリのメインページの概要	8
3.1 音楽用イコライザー: 音楽を聴くためのイコライザー設定を調整します	9
3.2 調整メニュー	9
4 サブメニュー	10
4.1 ホームページ機能	10
4.2 接続機能.....	11
4.3 携帯電話とのBluetoothペアリング	11
4.4 外部音取り込みモード.....	12
4.5 言語	13
4.6 カスタム設定	13
4.7 オーディオグラム (聴力検査)	14
4.8 情報.....	14
5 トラブルシューティング	15

1.はじめに

1.1 Otoadd Controlアプリについて

Otoadd Controlアプリへようこそ！ Otoaddワイヤレス補聴器用に設計されたこのアプリを使えば、補聴器の聞こえ方を自分好みにカスタマイズし、簡単にコントロールできます。音量調節から電池残量確認まで、すべてタップするだけで操作できます。

1.2 システム要件

Otoadd Controlアプリを使用するには、モバイルデバイスが次の要件を満たしていることを確認してください。

- オペレーティングシステム: iOS 11.0以降 / Android 11.0以降
- Bluetoothバージョン5.0以上

1.3 特徴

- 補聴器Classic Rと簡単なブルートゥースペアリング
- リアルタイムの音とノイズ低減
- 充電状態モニタリング

1.4 安全上のご注意

- 運転中または十分な注意を必要とする活動中は、アプリを使用しないでください。
- 突然の大きな音によって聴力が損なわれる恐れがありますので、音量は徐々上げるように調整してください。
- 必要に応じて耳鼻咽喉科を受診するか、補聴器専門店で認定補聴器機能者にご相談ください。

2.開始

2.1 Otoadd Controlアプリのインストール

1. APPストア (iOS) またはGoogle Playストア (Android) を開きます。
2. 「Otoadd Control 」を検索して、本アプリを見つけます。
3. 「インストール」または「入手」をタップしてOtoadd Controlをダウンロードしてスマートフォンにインストールします。
4. インストールしたら、スマートホンのホーム画面またはアプリドロワーでOtoadd Controlアプリのアイコンを見つけて、Otoadd Controlアプリをタップして起動します。



スマートホンのカメラを使用して、以下のQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。

Otoadd Control App



APP StoreまたはGoogle Playで「Otoadd Control」で検索して入手することもできます。




2.2 補聴器と携帯電話のペアリング

1. 補聴器の電源がオンになっていることを確認します。
2. 上部のボタンを「ペアリング」という音声聞こえるまで6秒間押し続けると、スマートホンとのペアリングモードに入ります。補聴器のLEDが点滅を始めます。
3. スマートホンでBluetooth設定に移動し、リストからOtoadd_R1を選択します。
4. 「Pairing successful, connected (ペアリング成功、接続されました)」という音声聞こえ、補聴器がスマートホンに接続されると補聴器のLEDの点滅が停止します。

注意: 補聴器Classic Rは一度に1つのスマートホンとのみペアリングできます。

2.3 アプリの許可

1. Otoadd Controlアプリの初回起動時：
iOS: [Bluetooth]を有効にしてください。
Android: Otoadd Controlアプリ実行時に[Bluetooth]と[位置情報]の両方を有効にしてください。

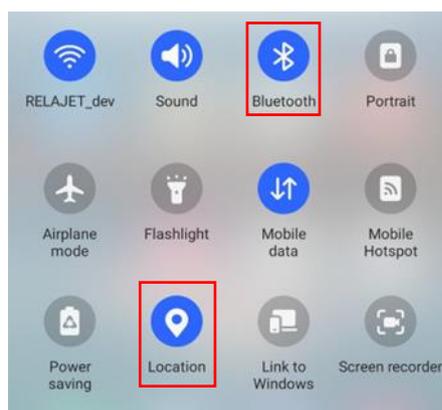

2.4 アプリの言語設定

Otoadd Controlアプリを初めて使用する場合、[Select]をタップして、言語を選択してください。現在、[中国語]、[英語]、[日本語]の3つの言語が提供されています。



2.5 補聴器Classic Rに接続します

「接続」をタップしてデバイスを検索します。



「検索」を選択し、デバイスリストから「Otoadd_R1」を選択します。




「確認」を選択して接続します。



3 アプリのメインページの概要


Otoadd Controlアプリのインターフェースは、ユーザーフレンドリーで直感的に操作できるよう設計されています。以下のセクションで構成されています。

- 聴覚モードを選択します。静かな屋内環境では「通常モード」を、騒がしい環境では「ノイズ低減」モードを選択します。
- 電池の状態: 現在の補聴器の電池残量を表示します。
- 音量コントロール: 「L」と「R」の音量バーを上下に動かして、左耳と右耳の音量を個別に調整します。
- イコライザー (Equalizer): 音楽を聴くための低音、中音、高音のレベルをカスタマイズします。
- 調整: 雑音抑制レベル (ノイズ低減)、聴取範囲、自声処理、風切り音抑制などの機能を調整します。

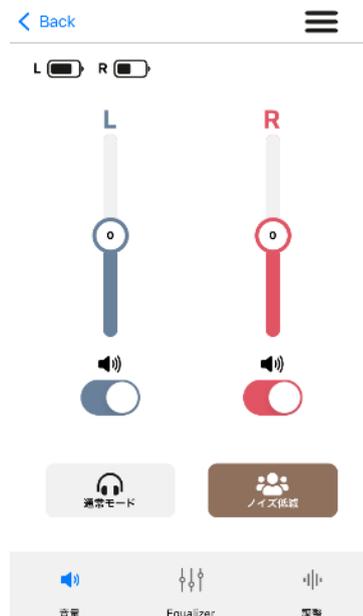

3.1 音楽用イコライザー: 音楽を聴くためのイコライザー設定を調整します

「Equalizer (イコライザ)」をタップし、音楽を聴くために、左右の耳の低音、中音、高音を個別に調整します。

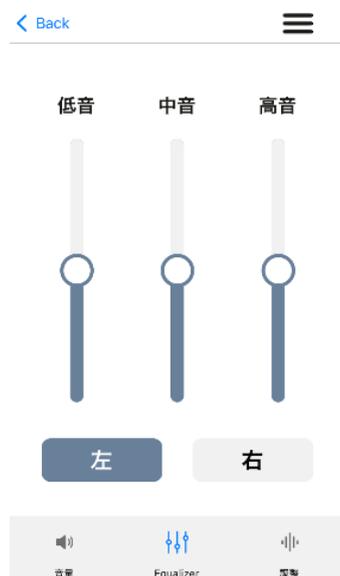

3.2 調整メニュー


調整には補聴器を調整するための4つの機能があります。

雑音抑制レベル (ノイズ低減) : 環境ノイズを低減するためにノイズ低減強度を調整します。

聴取範囲: 音を拾う距離を調整します。


自声処理: 自分の声の音量を下げます。

風抑制: 屋外活動時の風切り音を軽減します。

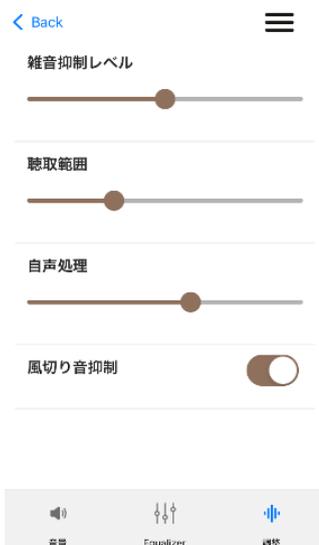

4 サブメニュー

「≡」アイコンを押すとサブメニューページに入ります

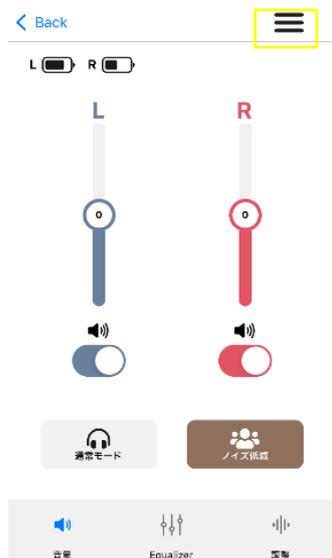

4.1 ホームページ機能

「ホームページ」を選択して「接続」ページに戻ります



4.2 接続機能

「補聴器に接続」機能を選択して補聴器を検索し接続します。



4.3 携帯電話とのBluetoothペアリング

「Bluetooth」を選択すると、補聴器Classic Rをスマートホンに接続し、ハンズフリー通話や音楽を聴くことができます。



「スマートホンとのペアリング」をタップすると、補聴器Classic R1青色LEDが非常に速く点滅し、「ペアリング」という音声が聞こえます。

スマートホンの設定から「Bluetooth」機能を選択してください。Bluetooth機能内で「Otoadd_R1」を検索して選択してください。Otoadd_R1がスマートホンと正常に接続されると、「pairing（接続済み）」という音声が聞こえ、補聴器Classic Rの青色LEDの点滅が停止します。

4.4 外部音取り込みモード

音楽を聴いているときに周囲の音を聞くことができます。補聴器Classic Rをスマートホンに接続する前に、外部音取り込みモード機能のオン/オフを切り替える必要があります。




4.5 言語

このメニューからいつでもアプリの言語を変更できます。



4.6 カスタム設定

現在の音量、調整、聴力検査の設定を保存するには、[カスタム設定] を選択します。

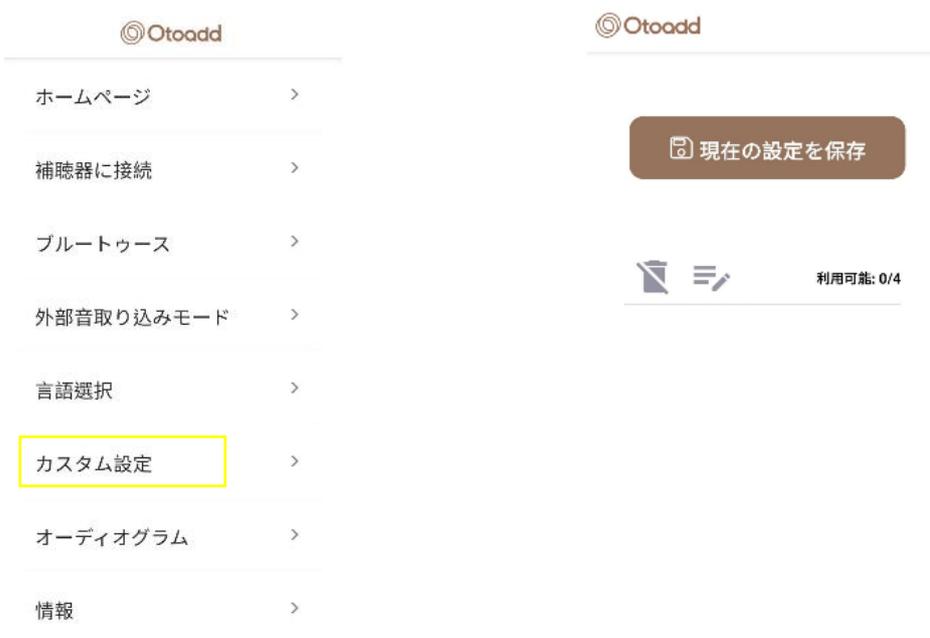

4.7 オーディオグラム（聴力検査）

「オーディオグラム」を選択して、左耳と右耳の聴力検査データを手動で入力し、個人に合わせた聴覚プロフィールを作成します。



4.8 情報

「情報」を選択すると、モデル名とアプリのバージョンが表示されます。



5 トラブルシューティング

本アプリの使用または本補聴器への接続で問題が発生した場合、次の手順をお試してください。

- スマートホンでBluetoothが有効になっていることを確認し、Androidスマートホンの場合は[Bluetooth]と[位置情報]の許可を付与してください。
- スマートホンの Bluetoothの有効範囲内で使用してください。
- アプリをすべて閉じてください。アプリを閉じる方法については、iOSまたはAndroidデバイスのマニュアルをご確認ください。
- Otoadd Controlアプリを再起動して、補聴器に再接続してください。
- その他のご質問やご不明な点がございましたら、サポートチームまでお気軽にお問い合わせください。



取扱説明書バージョン：V1.01

取扱説明書発行日：2025/8/1

製品名：補聴器Classic R

型名：HFE-001

FCC ID：2AX9Z-HFE-001

製造業者：RelaJet Tech (Taiwan) Co., Ltd.

製造業者住所：（台湾）台北市松山区南京西路4-150番

製造販売業者：株式会社NFテクノコマース

製造販売業者住所：〒223-0052 神奈川県横浜市綱島東6-3-20

製造販売業者電話：045-777-7604

ウェブサイト：<https://www.nf-techno.co.jp/>